


Fünf Schritte zur erfolgreichen Luftbefeuchtung

1



Nehmen Sie das Aquapak® und den Anfeuchtungsadapter aus ihrer Verpackung.

2

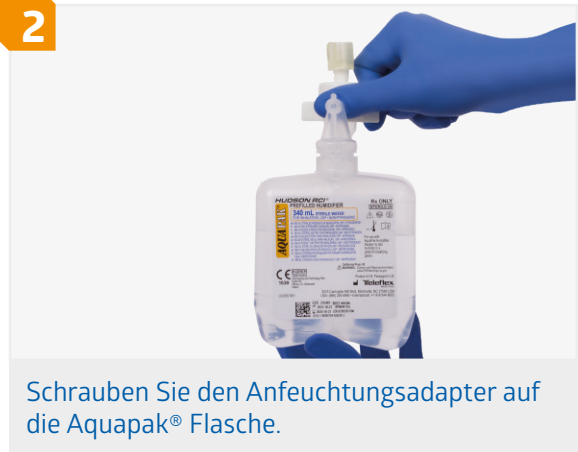

Schrauben Sie den Anfeuchtungsadapter auf die Aquapak® Flasche.

3



Brechen Sie den kleinen Plastiknippel an der Flasche ab, indem Sie ihn nach oben heben.

WARNUNG: Drehen Sie den Nippel nicht. Durch das Abdrehen des Verschlusses wird der Innendurchmesser der Aquapak®-Öffnung verkleinert und die Druckentlastung verringert, was zu einem Überdruck in der Flasche führt.

4



Schrauben Sie die kombinierte Aquapak® Flasche und den Anfeuchtungsadapter unter den Durchflussmesser.

5



Schließen Sie den Sauerstoffschlauch einschließlich der Schnittstelle (Maske/ Nasenkanüle) an den Anschluss an.